

Ortel C4 Vario

Použitie:

Striktná stabilizácia a odľahčenie krčnej chrbtice za podpory hrudnej kosti a stabilizácie zadnej časti hlavy.

Indikácie:

- pooperačná starostlivosť
- ťažká spondyloartritída
- ťažký cervikálny syndróm
- fyzické opotrebovanie, vysunutá platnička v krčnej chrbtici
- zlomenina krčnej chrbtice

Kontraindikácie:

- poškodenie pokožky v postihnutej oblasti

Vedľajšie účinky:

- žiadne problémy sa počas nasadenia a nosenia nevyskytli

Prosím tieto inštrukcie uchovajte!

Návod na použitie:

Golier Ortel C4 Vario musí byť odborníkom nasadený individuálne každému pacientovi. Pri prvom nasadení sú potrební aspoň dvaja ľudia. Jeden drží hlavu a zadnú časť krku pacienta v správnej polohe, pričom druhý nasadzuje ortézu.

- 1) Napravte pacienta do neutrálnej pozície s hlavou zarovnanou na stred
- 2) Nastavte zadnú časť ortézy na stred zadnej časti krku
- 3) Potom nastavte prednú časť goliera Ortel C4 Vario na stred zadnej časti
- 4) Pevne uchopte prednú časť ortézy a umiestnite okraj tesne ku krku pacienta. Upevnite ortézu striedavým priťahovaním upevňovacích pásov a uistite sa, že pásy majú rovnakú dĺžku na oboch stranách. Ak je to potrebné, tak prebytočné pásy môžete odstrihnúť. Ak bola ortéza nasadená správne, nemala by byť možnosť, aby sa brada šmýkala.
- 5) Možnosť nastavenia brady zabezpečuje distribúciu optimálneho tlaku a dokonalo spĺňa anatomické podmienky. Pre nastavenie uhla vytiahnite gombíky smerom von a jemným potočením upravte správnu pozíciu brady. Potom gombíky zatlačte smerom dovnútra. Dbajte na to, aby na oboch stranách bolo nastavenie výšky rovnaké.

Údržba:

- Odopnite mäkké podložky
- Vyčistite ich vlažnou mydlovou vodou, sušte voľne mimo tepelného zdroja
- Plastové časti vyčistite vlhkou handričkou a nechajte voľne uschnúť

Upozornenie:

- z hygienických dôvodov a z dôvodov účinnosti nepoužívajte výrobok pre ďalšieho pacienta

Zloženie:

- 32% Polykarbonát
- 30% Polypropylén
- 8% Polyamid
- 10% Polyuretán
- 10% Polyester
- 10% Bavlna

Výrobca:

THUASNE DEUTSCHLAND GmbH
Im Steinkamp 12
30938 Burgwald



Distribútor:

THUASNE SK, s. r. o.
Mokrâň záhon 4, 821 04, Bratislava
Tel: 02/4910 4088, 4910 4089
Fax: 02/4445 0080
E-mail: objednavky@thuasne.sk
www.thuasne.sk