



**THUASNE**

---

*WINGS  
FOR YOUR HEALTH*



**KOMPRESÍVNA  
TERAPIA**

# SKUPINA THUASNE MÁ 170 ROKOV



Elizabeth Ducottet  
Generálna riaditeľka skupiny THUASNE

Zo svojej základne, výrobe založenej v domácom prostredí Saint-Etienne, THUASNE koncern vyvinul, zdokonalil a vyprodukoval vďaka vlastnému know-how za viac ako 170 rokov zdravotnícke pomôcky umožňujúce všetkým pacientom a používateľom zhostiť sa starostlivosti o vlastné zdravie a stať sa tak jeho aktívnym hráčom. Využitím spoločnej histórie 6 generácií podnikateľov, predstaviteľov rodiny a zakladateľov, THUASNE ponúka konkrétne jednoduché prispôbené a inovatívne zdravotnícke riešenia na zdokonalenie pohyblivosti a to vo viac ako 85 krajinách.

Naše odborné znalosti sú zamerané na pacienta v odboroch: ortopédia (pásky, ortézy), kompresívnej terapie (flebológia, lymfológia, hojenie rán), starostlivosti o zdravie žien (prsňíkové epitézy, spodná bielizeň) a následnej starostlivosti.

**„Širokým záberom vlastných operácií zasahujúcich do sveta medicíny, materiálov a digitálnych technológií THUASNE vytvára a distribuuje zdravotnícke pomôcky umožňujúce všetkým pacientom a používateľom stať sa aktívnymi hráčmi v starostlivosti o svoje zdravie.“**

**Rok čo rok nám náš spoločný záväzok umožňuje lepšie manažovať množstvo chronických ochorení (bolesti chrbta, muskuloskeletálne poruchy, venóznú nedostatočnosť, lymfedém, atď.) pomocou neinvazívnych terapeutických riešení.“**



Autori fotografií:  
Studio Caterin  
Thierry Malty  
Jimmy Delpire  
Martin Colombet  
Alexis Goure  
Thuasne  
Petr Malyshev / Shutterstock  
Oram S. Dannreuteur

## FLEBOLÓGIA:

|                                                                                                                     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>VENOFLEX KOKOON®</b><br>štandardné liečebné kompresívne podkolenky,<br>stehenné pančuchy a pančuchové nohavice   | 06-07 |
| <b>VENOFLEX ELEGANCE®</b><br>štandardné liečebné kompresívne podkolenky,<br>stehenné pančuchy a pančuchové nohavice | 08-09 |
| <b>VENOFLEX MICRO®</b><br>štandardné liečebné kompresívne podkolenky,<br>stehenné pančuchy a pančuchové nohavice    | 10-11 |
| <b>VENO MICRO®</b><br>štandardné liečebné kompresívne podkolenky,<br>stehenné pančuchy a pančuchové nohavice        | 12-13 |
| <b>VENOFLEX CITY CONFORT COTON®</b><br>štandardné liečebné kompresívne podkolenky<br>a stehenné pančuchy pre pánov  | 14-15 |
| <b>VENOFLEX FAST COTON®</b><br>štandardné liečebné kompresívne podkolenky dámske a pánske                           | 16-17 |
| <b>VENOFLEX SOFT&amp;CARE®</b><br>štandardné liečebné kompresívne podkolenky                                        | 18-19 |
| <b>VENOFLEX CLINIC®</b><br>štandardné antiembolické kompresívne podkolenky a stehenné pančuchy                      | 20-21 |
| <b>KIT BIFLEX®</b><br>súprava krátkoťažných kompresívnych obväzov s kalibráciou                                     | 22-23 |

## LYMFOLÓGIA:

|                                                                                                                        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Čo je to lymfedém, dekongestívna (DCT) redukčná a udržiavacia fáza liečby                                              | 24-27 |
| <b>1. DCT fáza</b> – bandážovacie pomôcky: podložky, obväzy,<br><b>Mobiderm®</b> , peloty <b>Varico®</b>               | 28-33 |
| Kompresívne obväzy <b>Biflex®</b>                                                                                      | 34-35 |
| <b>2. udržiavacia fáza liečby lymfedému</b>                                                                            | 36-37 |
| <b>VENO Elegance®</b><br>štandardné liečebné kompresívne návleky a rukavičky                                           | 38-39 |
| <b>MOBIDERM®</b><br>štandardné mobilizačné návleky                                                                     | 40-41 |
| <b>MOBIDERM® AUTOFIT</b><br>štandardné mobilizačné návleky s nastavením kompresie                                      | 42-43 |
| Individuálne vyrábané ramenné návleky a kompresívne pančuchy<br><b>VENOFLEX Elegance®, VENOFLEX Micro a LYMPHATREX</b> | 44-45 |
| Kompresívne odevy <b>CICATREX®</b> na liečbu jaziev po popáleninách                                                    | 46-48 |





# KOMPRESÍVNÁ TERAPIA INDIKÁCIE

|                                                                                                                     | 10 - 15 mmHg<br>(ASQUAL) | 15 - 20 mmHg<br>(ASQUAL)<br>18 - 21 mmHg<br>(RAL) | 20 - 36 mmHg<br>(ASQUAL)<br>23 - 32 mmHg<br>(RAL) | > 36 mmHg<br>(ASQUAL)<br>34 - 46 mmHg<br>(RAL) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nepokojné nohy                                                                                                      | ●                        | ●                                                 | -                                                 | -                                              |
| Pocit ťažkých nôh                                                                                                   | ●                        | ●                                                 | -                                                 | -                                              |
| Metličkové retikulárne krčové žily                                                                                  | ●                        | -                                                 | -                                                 | -                                              |
| Teleangiektázie                                                                                                     | ●                        | -                                                 | -                                                 | -                                              |
| Prevenca pri dlhodobom státi                                                                                        | ●                        | -                                                 | -                                                 | -                                              |
| Prevenca pri dlhom cestovaní                                                                                        | ●                        | -                                                 | -                                                 | -                                              |
| Večerný edém                                                                                                        | -                        | ●                                                 | -                                                 | -                                              |
| Teleangiektázie alebo metličkovité<br>retikulárne krčové žily (< 3 mm)                                              | -                        | ●                                                 | -                                                 | -                                              |
| Po skleroterapii telangiektázií<br>alebo retikulárnych žíl (< 3 mm)                                                 | -                        | ●                                                 | -                                                 | -                                              |
| Po skleroterapii alebo chirurgickom<br>odstránení krčových žíl (≥ 3 mm)                                             | -                        | ●                                                 | ●                                                 | -                                              |
| Krčové žily (≥ 3 mm)                                                                                                | -                        | ●                                                 | ●                                                 | -                                              |
| Prevenca žilovej trombózy<br>u tehotných žien alebo žien po pôrode                                                  | -                        | ●                                                 | -                                                 | -                                              |
| Chronický žilový edém                                                                                               | -                        | -                                                 | ●                                                 | -                                              |
| Trofické zmeny (pigmentácia, ekzém),<br>chronické trofické problémy<br>(lipodermatoskleróza alebo artrofia blanche) | -                        | -                                                 | ●                                                 | -                                              |
| Zhojený vred predkolenia                                                                                            | -                        | -                                                 | ●                                                 | -                                              |
| Chronické venózne ochorenie súvisiace<br>s tehotenstvom alebo po pôrode                                             | -                        | -                                                 | ●                                                 | -                                              |
| Prevenca a/alebo liečba hlbkej žilovej trombózy<br>(dolnej končatiny) a posttrombotického syndrómu                  | -                        | -                                                 | ●                                                 | -                                              |
| Lymfedém dolnej končatiny (udržiavacia fáza)                                                                        | -                        | -                                                 | ●                                                 | -                                              |
| Trofické zmeny alebo otvorené vredy predkolenia                                                                     | -                        | -                                                 | -                                                 | ●                                              |
| Chronické venózne ochorenie súvisiace s vredom<br>predkolenia, tehotenstvom alebo po pôrode                         | -                        | -                                                 | -                                                 | ●                                              |
| Lymfedém                                                                                                            | -                        | -                                                 | -                                                 | ●                                              |




# VENOFLEX Kokoon®

štandardné liečebné kompresívne podkolenky, stehenné pančuchy  
a pančuchové nohavice

- vďaka jemným vláknám sú pančuchy veľmi pohodlné pri nosení a hebké na dotyk
- ľahko sa navliekajú
- stehenné pančuchy majú nekĺzavé ukončenie s elegantnou čipkou
- sú spevnené v oblasti päty a chodidla, čo prispieva k dobrej trvácnosti pančúch
- široká veľkostná škála je prispôbena morfológii
- modely s otvoreným aj zatvoreným špicom
- ploché švy v spojoch, antibakteriálna úprava
- jednoduchá údržba, možnosť prať v práčke pri 40°C bez aviváže

| Venoflex Kokoon® - tabuľka veľkostí |                                          |         |                                        |                                          |         |          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|---------|----------------------------------------|------------------------------------------|---------|----------|
| Podkolenky                          |                                          |         | Stehenné pančuchy, pančuchové nohavice |                                          |         |          |
| ženy                                | Normálne: ID < 40 cm<br>Dlhé: ID > 40 cm |         | ženy                                   | Normálne: IK < 74 cm<br>Dlhé: IK > 74 cm |         |          |
| Veľkosť                             | cB [cm]                                  | cC [cm] | Veľkosť                                | cB [cm]                                  | cG [cm] | cG+ [cm] |
| 0                                   | 16 - 19                                  | 28 - 33 | 0                                      | 16 - 19                                  | 42 - 52 | 52 - 57  |
| 1                                   | 19 - 21                                  | 30 - 35 | 1                                      | 19 - 21                                  | 45 - 54 | 54 - 59  |
| 2                                   | 21 - 24                                  | 32 - 38 | 2                                      | 21 - 24                                  | 50 - 59 | 59 - 66  |
| 3                                   | 24 - 26                                  | 34 - 42 | 3                                      | 24 - 26                                  | 56 - 66 | 67 - 70  |
| 4                                   | 26 - 29                                  | 37 - 46 | 4                                      | 26 - 29                                  | 58 - 69 | 69 - 74  |

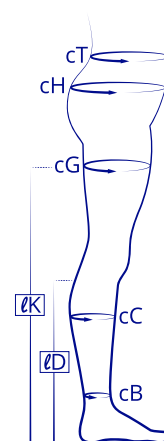

čierna (black)      prírodná béžová  
(natural beige)



**Venoflex® Kokoon AD**  
podkolenky  
**Kód ZP G88144**  
ref. číslo 5230 03



**Venoflex® Kokoon AG**  
stehenné pančuchy  
**Kód ZP G88146**  
ref. číslo 5235 03



**Venoflex® Kokoon AT**  
pančuchové nohavice  
**Kód ZP G92211**  
ref. číslo 5233 03





# VENOFLEX


Elegance



# VENOFLEX Elegance®

štandardné liečebné kompresívne podkolenky,  
stehenné pančuchy a pančuchové nohavice

- moderné kompresívne pančuchy na každodenné nosenie pre dámy aj pánov
- materiál je veľmi príjemný na pokožku, vhodný aj pre alergikov
- pohodlné pri nosení
- vysoká liečebná účinnosť
- módny vzhľad, priedušné
- vysoká odolnosť voči opotrebovaniu
- nekĺzavé ukončenie v dvoch možných prevedeniach (krajkové, hladké)
- modely s otvoreným aj zatvoreným špicom

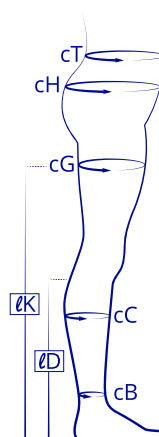

Veľkostná tabuľka kompresívnych pančúch VENOFLEX Elegance®

|     | OBVODY (cm)            | 1        | 2        | 3        | 4         | 5         | 6         |
|-----|------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| cT  | obvod pásu             | 59 - 70  | 66 - 80  | 76 - 85  | 82 - 90   | 88 - 95   | 92 - 105  |
| cH  | obvod bokov            | 85 - 105 | 90 - 110 | 95 - 115 | 100 - 120 | 105 - 125 | 110 - 130 |
| cG  | obvod stehna           | 43 - 48  | 45 - 52  | 49 - 56  | 53 - 60   | 56 - 64   | 60 - 68   |
| cG+ | obvod stehna rozšírený | 49 - 57  | 53 - 62  | 57 - 67  | 61 - 72   | 65 - 77   | 69 - 81   |
| cD  | obvod pod kolenom      | 27 - 33  | 29 - 36  | 32 - 39  | 34 - 42   | 36 - 45   | 38 - 48   |
| cB  | obvod členka           | 18 - 20  | 20 - 22  | 22 - 24  | 24 - 26   | 26 - 28   | 28 - 30   |

Dĺžky (cm)

| AD - lýtkové<br>(od zeme po koleno) | AG - stehenné<br>(od zeme po 5 cm pod rozkrok) | AT - pančuchové nohavice<br>(od zeme po 5 cm pod rozkrok) |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| krátke 34 - 39                      | krátke 60 - 69                                 |                                                           |
|                                     | normálne 70 - 80                               | normálne 65 - 75                                          |
| dlhé 39 - 45                        | dlhé 81 - 90                                   | dlhé 75 - 85                                              |



**Venoflex Elegance® AD**  
podkolenky  
**Kód ZP**  
**G72319**  
ref. číslo  
2002 1B



**Venoflex Elegance® AG**  
stehenné  
pančuchy  
**Kód ZP**  
**G72321**  
ref. číslo  
2002 3E



**Venoflex Elegance® AT**  
pančuchové  
nohavice  
**Kód ZP**  
**G72325**  
ref. číslo  
2002 5B



**Venoflex Elegance® AT**  
tehotenské  
pančuchové  
nohavice  
**Kód ZP**  
**G72328**  
ref. číslo  
2002 7B



telová  
(light)



hnedá\*  
(mode)



diamantová  
(diamant)



karamelová  
(caramel)



modrá  
(marine)



čierna  
(black)

\* Skladom sú hnedé podkolenky,  
stehenné pančuchy a tehotenské  
pančuchové nohavice.



pohodlné  
ukončenie  
otvoreného  
špicu




oblasť  
spevnenej päty

# VENOFLEX Micro®

štandardné liečebné kompresívne podkolenky,  
stehenné pančuchy a pančuchové nohavice

- elegantné kompresívne pančuchy vyrobené z veľmi jemných mikrovlákién
- vďaka špeciálne priliehavým vláknám sa výborne prispôbia končatine
- materiál je veľmi príjemný na pokožku a pohodlný pri nosení
- vysoká liečebná účinnosť
- módny vzhľad, priedušné
- vďaka hodvábné jemnému materiálu je obliekanie aj vyzliekanie veľmi jednoduché a rýchle
- opticky nerozlíšiteľné od konfekčných
- vysoká odolnosť voči opotrebovaniu
- farebná škála prispôsobiteľná každému oblečeniu
- nekĺzavé ukončenie v dvoch možných prevedeniach (krajkové, hladké)
- **modely s otvoreným aj zatvoreným špicom**

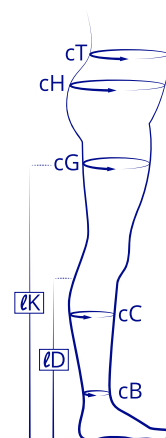

Veľkostná tabuľka kompresívnych pančúch Venoflex MICRO

|        | OBVODY (cm)                              | 1        | 2        | 3        | 4         | 5         | 6         |
|--------|------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| cT     | obvod pásu                               | 59 - 70  | 66 - 80  | 76 - 85  | 82 - 90   | 88 - 95   | 92 - 105  |
| cH     | obvod bokov                              | 85 - 105 | 90 - 110 | 95 - 115 | 100 - 120 | 105 - 125 | 110 - 130 |
| cG     | obvod stehna pančuchové nohavice         | 43 - 57  | 45 - 62  | 49 - 67  | 53 - 72   | 56 - 77   | 60 - 81   |
| cG HB  | obvod stehna stehenné pančuchy           | 43 - 48  | 45 - 52  | 49 - 56  | 53 - 60   | 56 - 64   | 60 - 68   |
| cG HB+ | obvod stehna rozšírený stehenné pančuchy | 49 - 57  | 53 - 62  | 57 - 67  | 61 - 72   | 65 - 77   | 69 - 81   |
| cD     | obvod pod kolenom                        | 27 - 33  | 29 - 36  | 32 - 39  | 34 - 42   | 36 - 45   | 38 - 48   |
| cB     | obvod členka                             | 18 - 20  | 20 - 22  | 22 - 24  | 24 - 26   | 26 - 28   | 28 - 30   |

Dĺžky (cm)

| AD - lýtkové<br>(od zeme po<br>kolenom) | AG - stehenné<br>(od zeme po 5 cm<br>pod rozkrok) | AT - pančuchové<br>nohavice<br>(od zeme po 5 cm<br>pod rozkrok) |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| krátke 34 - 39                          | krátke 60 - 69                                    |                                                                 |
|                                         | normálne 70 - 80                                  | normálne 66 - 75                                                |
| dlhé 39 - 45                            | dlhé 81 - 90                                      | dlhé 75 - 85                                                    |

Dostupné farby:



**Venoflex  
Micro AD**  
podkolenky  
**Kód ZP**  
**G98243**  
ref. číslo  
3002 1B



**Venoflex  
Micro AG**  
stehenné  
pančuchy  
**Kód ZP**  
**G98244**  
ref. číslo  
3002 3E



**Venoflex  
Micro AT**  
pančuchové  
nohavice  
**Kód ZP**  
**G98245**  
ref. číslo  
3002 5B



nekĺzavé  
ukončenie  
s krajkou

nekĺzavé  
ukončenie  
hladké

\* Skladom

**THUASNE • 11**






# VENO Micro®

DOPREDAJ

štandardné liečebné kompresívne podkolenky, stehenné pančuchy a pančuchové nohavice

- elegantné kompresívne pančuchy vyrobené z jemných mikrovlákién
- pančuchy sú veľmi pohodlné pri nosení
- módny vzhľad, priedušné
- vysoká odolnosť voči opotrebovaniu
- modely s otvoreným aj zatvoreným špicom

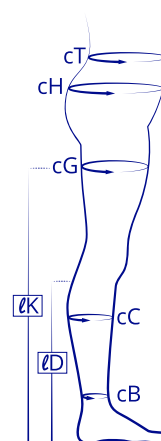

Vel'kostná tabuľka kompresívnych pančúch Veno MICRO

|    | OBVODY (cm)       | 1       | 2       | 3       | 4       |
|----|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| cG | obvod stehna      | 49 – 56 | 54 – 62 | 59 – 67 | 64 – 74 |
| cD | obvod pod kolonom | 28 – 34 | 32 – 39 | 37 – 44 | 41 – 47 |
| cB | obvod členka      | 19 – 21 | 22 – 24 | 25 – 27 | 28 – 30 |

Dĺžky (cm)

| AD - lýtkové<br>(od zeme po koleno) | AG - stehenné<br>(od zeme po 5 cm pod rozkrok) | AT - pančuchové nohavice<br>(od zeme po 5 cm pod rozkrok) |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| krátke 36 – 41                      | normálne 66 – 73                               | normálne 66 – 73                                          |
| dlhé 42 – 48                        | dlhé 74 – 82                                   | dlhé 74 – 82                                              |



**Veno Micro AD**  
podkolenky  
**Kód ZP**  
**G72320**  
ref. číslo 3001 12



**Veno Micro AG**  
stehenné  
pančuchy  
**Kód ZP**  
**G72322**  
ref. číslo 3001 32



**Veno Micro AT**  
pančuchové  
nohavice  
**Kód ZP**  
**G72327**  
ref. číslo 3001 52



čierna  
(black)



prírodná béžová  
(natural beige)










# VENOFLEX

## CITY CONFORT COTTON®

štandardné liečebné kompresívne podkolenky a stehenné pančuchy pre pánov

- vyrobené z mäkkej pohodlnej bavlny na každodenné nosenie
- veľmi pohodlné pri nosení a hebké na dotyk
- ľahko sa navliekajú
- módny dizajn s vrúbkovaným vzorom
- široká veľkostná škála je prispôbená morfológii mužskej končatiny
- modely s otvoreným aj zatvoreným špicom
- vysoká odolnosť voči opotrebovaniu
- jednoduchá údržba, možnosť prať v práčke pri 40°C bez aviváže
- **zloženie podkolenky:** 46% bavlna, 37% polyamid, 17% elastán
- **zloženie stehenné pančuchy:** 46% bavlna, 33% polyamid, 21% elastán

| Venoflex City Confort Coton |                                          |         |                   |                                          |         |
|-----------------------------|------------------------------------------|---------|-------------------|------------------------------------------|---------|
| Podkolenky                  |                                          |         | Stehenné pančuchy |                                          |         |
| <b>muži</b>                 | Normálne: ID < 44 cm<br>Dlhé: ID > 44 cm |         | <b>muži</b>       | Normálne: IK < 78 cm<br>Dlhé: IK > 78 cm |         |
| Veľkosť                     | cB [cm]                                  | cC [cm] | Veľkosť           | cB [cm]                                  | cG [cm] |
| 1                           | 19 - 21                                  | 30 - 35 | 1                 | 19 - 21                                  | 45 - 54 |
| 2                           | 21 - 24                                  | 32 - 38 | 2                 | 21 - 24                                  | 50 - 59 |
| 3                           | 24 - 26                                  | 34 - 42 | 3                 | 24 - 26                                  | 56 - 66 |
| 4                           | 26 - 29                                  | 37 - 46 | 4                 | 26 - 29                                  | 58 - 69 |

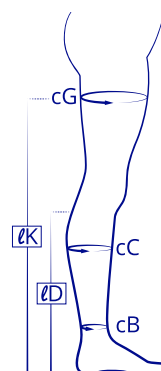

čierna  
(black)



**Venoflex City  
Coton AD**  
podkolenky  
**Kód ZP G88145**  
ref. číslo 5339 01

**Venoflex City  
Coton AG**  
stehenné pančuchy  
**Kód ZP G88147**  
ref. číslo 5338 01



# VENOFLEX *FAST* COTON

## štandardné liečebné kompresívne podkolenky dámske a pánske

- vyrobené z mäkkej pohodlnej bavlny na každodenné nosenie
- vynikajúca absorpcia a odvádzanie vlhkosti vďaka špeciálnemu vzoru a vysokému obsahu bavlny
- veľmi pohodlné pri nosení a hebké na dotyk
- ľahko sa navliekajú vďaka veľkej rozťažnosti
- graduovaný tlak od členka nahor rešpektujúci fyziológiu
- módny dizajn s írskym vzorom pre dámy a vrúbkovaným vzorom pre pánov
- široká veľkostná škála je prispôsobená morfológii zvlášť ženskej a mužskej končatiny
- ploché švy nad nechťovými lôžkami a nie v oblasti prstov
- vysoká odolnosť voči opotrebovaniu
- špeciálne široké patentované horné ukončenie neobmedzujúce cirkuláciu
- jednoduchá údržba, možnosť prať v práčke pri 40°C bez aviváže
- zloženie: 34% bavlna, 50% polyamid, 16% elastán

| Tabuľka veľkostí |                      |         |
|------------------|----------------------|---------|
| ženy             | Normálne: ID < 40 cm |         |
|                  | Dlhé: ID > 40 cm     |         |
| muži             | Normálne: ID < 44 cm |         |
|                  | Dlhé: ID > 44 cm     |         |
| Veľkosť          | cB [cm]              | cC [cm] |
| 1                | 19 - 21              | 30 - 35 |
| 2                | 21 - 24              | 32 - 38 |
| 3                | 24 - 26              | 34 - 42 |
| 4                | 26 - 29              | 37 - 46 |



### Dámske




čierna  
s írskym  
vzorom  
(black Irish)

### Pánske



čierna  
(black)

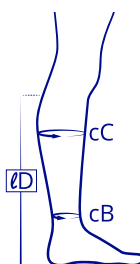

**Venoflex Fast Coton AD** podkolenky

**Kód ZP G92212**

dámske: ref. číslo 6130 01

pánske: ref. číslo 6139 01





Obsahujú  
**VISKÓZU**

VLÁKNO ZÍSKANÉ  
Z CELULÓZY



## VLASTNOSTI VISKÓZY

Viskóza je často nazývaná ako **syntetický hodváb** vďaka jej mäkkosti. Je to vlákno vyrobené z prírodného materiálu (celulóza získaná z dreva). Vďaka jeho schopnosti pohlcovať vlhkosť a priedušnosti, dokáže prirodzene regulovať teplotu. **Viskóza** sa ľahko farbí, preto sú farby hotových výrobkov dokonale sýte a odolné voči opotrebovaniu.

## HEBKOSŤ

**Viskóza:** hlavná zložka materiálu kompresívnej podkolenky. Zabezpečuje príjemný hodvábný a mäkký pocit pri dotyku s pokožkou. *94% pacientov, ktorí podkolenky vyskúšali, ich ohodnotili ako hebké \**

# VENOFLEX

## SOFT & CARE PODKOLIENKY

*Ked' ich vyskúšate, hneď si ich zamilujete!*

- **tenký okraj** zabraňuje turniketovému efektu
  - **viskóza** zabraňuje poteniu, dokonalá termoregulácia.
- Podkolenky sú vhodné aj pre alergikov a ľudí s citlivou pokožkou.
- **materiál ľahko a rovnomerne rozvrstvený po končatine:** zabraňuje tvorbe záhybov a výborne sa prispôsobuje končatine.
- 91% pacientov, ktorí podkolenky vyskúšali, ich hodnotili ako pohodlné na nosenie\*

- **špecifické viskóзовé vlákno:** ľahké natáhanie, dobre kľže po končatine.
- **voľný úplet:** jednoduché obliekanie aj vyzliekanie.

Sú špeciálne vyvinuté pre pacientov so stuhnutosťou kĺbov, s pocitom studených nôh, artritídou, reumatizmom, problémami s rovnováhou, starších pacientov s problémom navliekať pančuchy.


95% pacientov ohodnotilo podkolenky, že sa ľahšie obliekajú a vyzliekajú ako ostatné testované produkty\*

### Jednotná veľkostná tabuľka:

| Veľkosť | cB (cm)<br>obvod členka | cC (cm)<br>obvod lýtky | Výška od zeme<br>po koleno (cm)                                        |
|---------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 0       | 16 - 19                 | 28 - 33                | Krátke : /D < 40 cm<br>Normálne : 40 < /D < 44 cm<br>Dlhé : /D > 44 cm |
| 1       | 19 - 21                 | 30 - 35                |                                                                        |
| 2       | 21 - 24                 | 32 - 38                |                                                                        |
| 3       | 24 - 26                 | 34 - 42                |                                                                        |
| 4       | 26 - 29                 | 37 - 46                |                                                                        |



čierna  
(black)

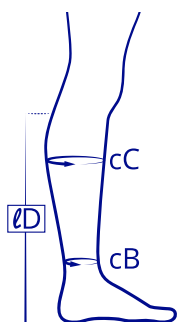

**Venoflex Soft & Care** podkolenky  
**Kód ZP: G1198A**  
ref. číslo 6230 01

\* Nezávislá externá štúdia vykonaná výskumným inštitútom Techni´Sens – EH2798 pre Thuasne vo februári 2019 na vzorke 85 ľudí, ktorí porovnávali výrobky 5 rozličných výrobcov kompresívnych pančúch. Parametre: jednoduchosť obliekania a vyzliekania, pohodlie, hebkosť a záujem o kúpu produktu vyšli jednoznačne v prospech firmy Thuasne pre Venoflex Soft & Care kompresívna trieda 2.





- **kompresívne lýtkové a stehenné antiembolické pančuchy pre ženy a mužov**

- sú určené pre pacientov v predoperačnom a pooperačnom období vyžadujúcim si pobyt na lôžku
- zabraňujú vzniku trombózy a následnej embólie, venostáze dolných končatín
- modely s otvoreným špicom
- materiál s antibakteriálnou úpravou


**Indikácie k predpísaniu pomôcky na chirurgický zákrok:**

- po flebologickej operácii a skleroterapii
- hlboká žilová trombóza
- na podporu venózneho systému
- zlepšujú lymfatickú drenáž




# VENOFLEX CLINIC®

| Tabuľka veľkostí |              |             |              |
|------------------|--------------|-------------|--------------|
|                  | AD + AG      | AD          | AG           |
| Veľkosti         | členok cB/cm | lýtka cD/cm | stehno cG/cm |
| 1                | 17-19        | 30-35       | 45-54        |
| 2                | 19-22        | 32-38       | 50-59        |
| 3                | 22-25        | 34-42       | 56-66        |
| 4                | 25-29        | 37-46       | 58-69        |
| 5                | 29-31        | 43-49       | 63-74        |
| Dĺžky            | štandardné   | < 40        | < 74         |
|                  | Dlhé         | > 40        | > 74         |

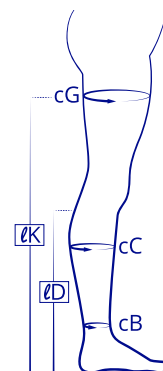

## Venoflex Clinic AD

podkolenky  
ref. číslo 5820 01

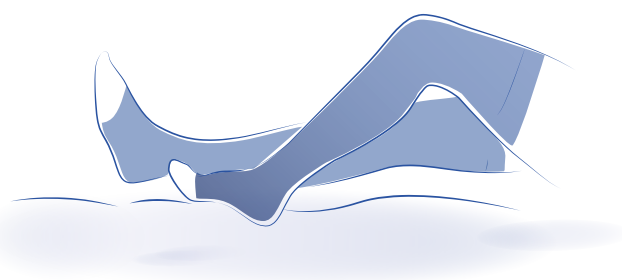

## Venoflex Clinic AG

stehenné pančuchy  
**Kód ZP G94282**  
ref. číslo 5825 01

# KITBIFLEX

## Súprava krátkot'ážných kompresívnych obväzov s kalibráciou **na liečbu venózných vredov** predkolenia

Viskóza zabezpečuje dokonalú termoreguláciu, príjemný hodvábný a mäkký pocit pri dotyku s pokožkou. Obväzy sú terapeuticky účinné, pritom však mimoriadne priedušné a vhodné aj pre alergikov a ľudí s citlivou pokožkou.




### 1. kompresívny obväz

- vytvára podporu a ochranu pokožke a kostným výčnelkom,
- tvorí ho polyesterové mikrovlné, viskóza a elastán (s elasticitou 10–100%),
- zabezpečuje podporu končatiny.



### 2. kompresívny obväz

- vytvára požadovanú úroveň kompresie pri liečbe venózneho vředu predkolenia
- je vyrobený z viskózy, polyesteru, polyamidu a elastánu s maximálnou elasticitou 10–100%.

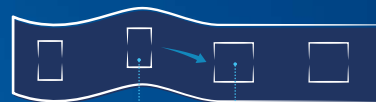

Obdĺžnik Štvorec

Vďaka patentovanej kalibračnej technológii oboch obväzov je technika nakladania bandáže jednoduchá a je zaručená optimálna reprodukovateľnosť nakladania a dodržiavaný správny tlak potrebný na liečbu.



• označenie prekrytia  
tlak v oblasti členku >36mmHg

• patentovaná kalibrácia



### OPAKOVANE POUŽITEĽNÝ

oba obväzy v súprave môžu byť opakovane použité po prebandážovaní alebo pri významnej zmene opuchu



### ÚDRŽBA

oba obväzy v súprave sa môžu prať v práčke pri teplote 40°C.



Kit je vyvinutý tak, aby mohla byť bandáž naložená vo dne aj v noci v max. dĺžke 7 dní.

Pozrite si video:



youtube.com

KITBIFLEX Short Stretch



Produkt je dostupný v 3 veľkostiach a len v 1 šírke, aby vyhovoval morfológii pacienta


veľkosť 1: < 25 cm  
veľkosť 2: 25-30 cm  
veľkosť 3: > 30 cm



# VÝSLEDKY KLINICKEJ ŠTÚDIE

dokázaná klinická účinnosť  
**2x viac pacientov bolo vyliečených za 16 týždňov**  
49% KITBIFLEX / 24% Profore® (P<0,018)

## KONTROLOVANÉ NÁKLADY POČAS LIEČBY:

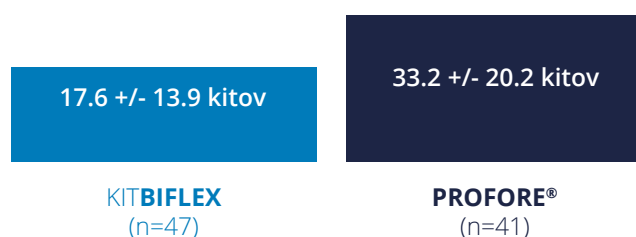

V priemere o  
**47%**  
**menej** KITBIFLEX  
súprav bolo použitých  
oproti Profore®  
(P < 0.001)

## SPOKOJNOSŤ PACIENTOV:



**94.6%** hodnotilo KITBIFLEX za **pohodlný**  
**Mäkkosť a jemnosť: 100%** bolo spokojných alebo  
veľmi spokojných  
**94.6%** považovalo tlak za prijateľný  
**Priedušnosť / teplo: 97.3%** bolo spokojných  
alebo veľmi spokojných

Priemerné percento  
**spokojnosti**  
**pacientov:**  
**97.6%**



**Jednoduchosť aplikácie: 100%** bolo spokojných  
alebo veľmi spokojných  
**Dĺžka aplikácie: 100%** bolo spokojných alebo veľmi spokojných  
**97,8%** považovalo KITBIFLEX za **praktický**  
**86,7%** vyhodnotilo KITBIFLEX, **že dobré drží na nohe**

Priemerné percento  
**spokojnosti**  
**zdravotníckych**  
**odborníkov:**  
**97.8%**

## NOVÝ SPÔSOB LIEČBY NA SLOVENSKU...

Dvojnásobný počet pacientov  
liečených s polovičným  
počtom súprav <sup>(1)</sup>



## KIT BIFLEX

na báze viskózy bez latexu

**Kód ZP: G1199A**

Veľk. 1 ref. číslo 170050 20199999

Veľk. 2 ref. číslo 170050 20299999

Veľk. 3 ref. číslo 170050 20399999





# LYMFOLÓGIA

## Čo je to lymfedém, dekongestívna (DCT) redukčná a udržiavacia fáza liečby

### Čo je lymfedém

Lymfedém je dlhotrvajúce ochorenie prejavujúce sa opuchom. Vzniká ako následok zlej funkcie lymfatického (čiže miazgového) systému, pri ktorej dochádza k hromadeniu tekutiny v tkanive. **Princíp lymfedému:** ak odvod vznikajúceho nadbytku tekutiny v tkanive lymfatickým systémom nefunguje správne, lymfa sa v tkanive hromadí a dané miesto začína opúchať.

### Dekongestívna (DCT) redukčná fáza lymfedému

Liečba lymfedému je z 98% konzervatívna. Začína komplexnou dekongestívnou liečbou, t.j. intenzívnou fázou liečby zameranou na redukciu lymfedému. Pozostáva z niekoľkodňovej sústavnej rehabilitačnej liečby pozostávajúcej z:

1. antiedematóznej gymnastiky
2. manuálnej lymfodrenáže
3. prístrojovej kompresívnej liečby
4. viacrstvového kompresívneho bandážovania

### Udržiavacia fáza lymfedému

alebo aj stabilizačná fáza liečby lymfedému sa vyznačuje udrzaním zredukovaného objemu opuchu a to:


- nosením kompresívnych pomôcok (súčasť každodenného života)
- autorehabilitáciou
- dodržiavaním zásad životosprávy pacienta s lymfedémom
- dispenzárnou starostlivosťou
- hydrokinezioterapiou – cvičením vo vode

### Rozlišujeme 2 druhy lymfedému: **primárny a sekundárny**

**Primárny lymfedém** je podmienený primárnymi patologickými zmenami na lymfatickom systéme, ktorých príčinou je vývojová porucha, keď dôjde k nedokonalému vývoju lymfatických ciev alebo lymfatických uzlín. Spúšťacím mechanizmom môže byť úraz, infekcia, prílišná záťaž, dlhé sedenie či státie. Opuch sa vyskytuje na končatinách, predovšetkým na nohe (oblasť prstov, členkov). Niekedy býva opuch asymetrický, teda na druhej končatine úplne chýba. Šírenie primárneho lymfedému prebieha proximálne (tzn. ku stredu tela - na nohe smerom ku bedrám, na ruke smerom k ramenu) - označuje sa aj ako ascendentná forma.

### **Sekundárny lymfedém**


sa môže objaviť v ktoromkoľvek veku, ako následok poranenia lymfatického systému. Najčastejšie následkom exstirpácie lymfatických uzlín a ciev pri operácii, poškodením lymfatických ciev žiarením a zápalom alebo bloádou lymfatických uzlín nádorom. Taktiež následkom úrazov. Sekundárny lymfedém sa vyskytuje v zostupnej forme, pretože opuch vzniká tesne pod prekážkou v odtoku lymfy a šíri sa distálne (na okraje končatín - prsty).

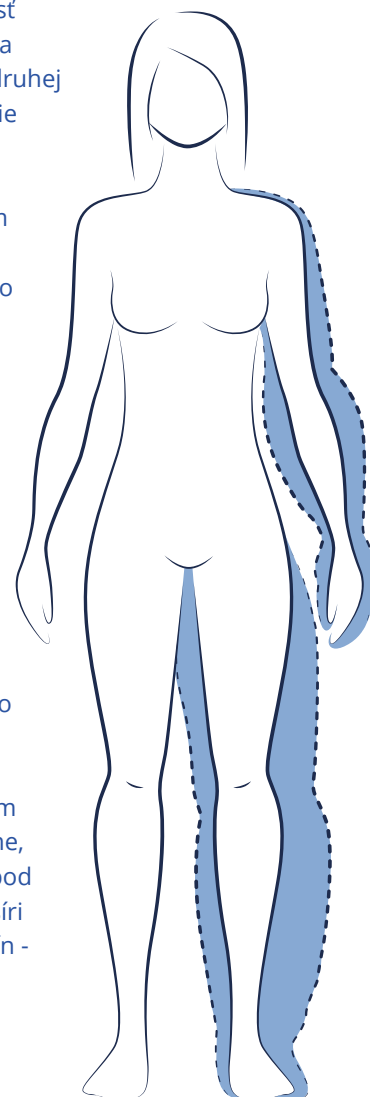


## MORFOLÓGIA SÚMERNÁ



CIRKULÁRNE  
TKANÉ  
KOMPRESÍVNE  
ODEVY

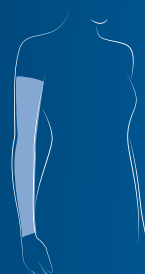

Ramenný  
návlek

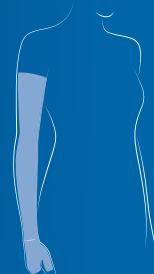

Ramenný  
návlek  
s rukavičkou



Rukavička



podkolenky



stehenné  
pančuchy



pančuchové  
nohavice



pančuchové  
nohavice  
na 1 nohu



# lymfedému udžiavacej fázy

ALEBO MIERNY LYMFEDÉM

MORFOLÓGIA NESÚMERNÁ  
ALEBO ŤAŽKÝ LYMFEDÉM



**MOBIDERM**  
ŠTANDARDNÉ  
ODEVY

**MOBIDERM**  
Autofit



Ramenný  
návlek



Ramenný  
návlek s rukavičkou



Rukavička  
bez prstov



Rukavička  
s prstami




lýtťkový návlek



Stehenný návlek



PLOCHO TKANÉ  
KOMPRESÍVNE  
ODEVY  
**LYMPHATREX**

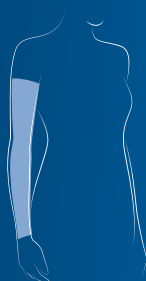

Ramenný  
návlek



Ramenný  
návlek s rukavičkou



Rukavička  
bez prstov



Rukavička s prstami  
bezšvíková



podkolienky



stehenné  
pančuchy



pančuchové  
nohavice



pančuchové  
nohavice  
na 1 nohu



**MOBIDERM**  
ODEVY VYROBENÉ  
NA MIERU

**MOBIDERM**  
Autofit



Ramenný  
návlek



Ramenný  
návlek s rukavičkou



lýtťkový návlek



lýtťkový návlek



Stehenný návlek



Stehenný návlek

## 1. DCT FÁZA

BANDÁŽOVACIE POMÔCKY: PODLOŽKY,  
MOBIDERM®, OBVÄZY, PELOTY VARICO®

# MOBIDERM®

## V REDUKČNEJ FÁZE LIEČBY LYMFEDÉMU

Systém na mobilizáciu edematózneho alebo stvrdnutého podkožného tkaniva.  
Veľmi jednoduché použitie, významné urýchlenie bandážovania a zmenšenia edému.

### ÚČINNÉ:

- liečba edému je optimalizovaná stimuláciou podkožného tkaniva (vytvára sa rozdielny tlak na kontaktnú a okolitú oblasť),
- rýchle zmenšovanie edému.


### PRAKTICKÉ:

- ľahký, pohodlný a poddajný materiál,
- predpripravený, ľahko vystrihovateľný systém na uľahčenie použitia obväzu,
- dá sa prať v rukách a je znovu použiteľný (pre toho istého pacienta).

### POHODLNÉ:

- mimoriadne jemný kontakt s pokožkou.

PATENTOVANÁ  
POMÔCKA

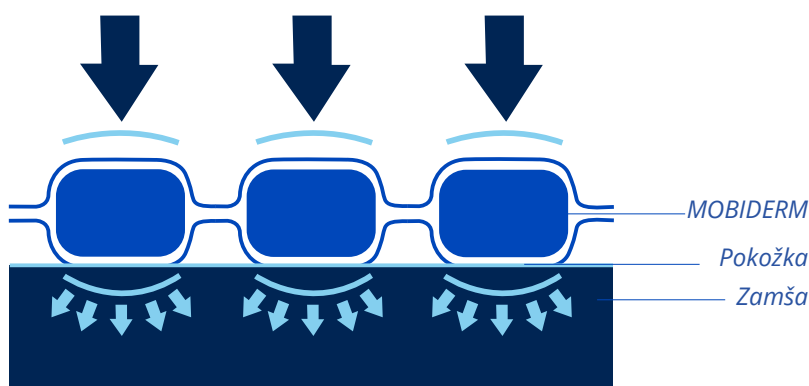

### MOBIDERM PODLOŽKA KOCKY:

5 mm x 5 mm (37100102502501)  
15 mm x 15 mm (37100103310002)  
(Kód ZP G79882)



20 cm x 1 m  
20 cm x 1 m

### MOBIDERM OBVÄZ 10cm x 3 m KOCKY:

5 mm x 5 mm  
(37200101030001)  
15 mm x 15 mm  
(37200101030002)  
(Kód ZP G79883)



# 1.DCT (REDUKČNÁ) FÁZA

## VIACVRSTVOVÉ KOMPRESÍVNE BANDÁŽOVANIE - PROTOKOL MOBIDERM®



1

1. VRSTVA - OCHRANA POKOŽKY

### **BAVLNENÝ OBVÄZ SHORT STRECH alebo OCHRANNÁ PENA**

tubulárna podložka alebo penové ovinutie príde priamo na pokožku a vytvára pohodlnú a jemnú ochranu pokožky.



2

2. DRENÁŽNA VRSTVA

### **MOBIDERM OBVÄZ :**

na mobilizáciu podkožného tkaniva, aby sa redukoval opuch.



3

3. VRSTVA

### **BIFLEXIDEAL®:**

**pôsobenie krátkoťažným obvázom**

elasticita < 100% (používa sa do 90%), krátkoťažný obvaz garantuje účinok drenáže spolu s fyzickým pohybom.



4

4. VRSTVA

### **BIFLEX® :**

**kompresia**

viacroťažný kompresívny obvaz uzatvára bandáž a aktívne komprimuje edém.







## BAVLNENÝ OBVÄZ SHORT STRETCH

### Pevný protiedémový obväz (Kód ZP A86968)

Obväz tvaru trubice. Zloženie 100% bavlna.

| Šírka | Dĺžka | Farba | Ref. číslo |
|-------|-------|-------|------------|
| 11 cm | 4 m   | biela | 0101 01    |



## OCHRANNÁ PENA

### Ochranné ovinutie

**POPIS :** Tenký elastický obväz.

| Šírka | Dĺžka | Ref. číslo |
|-------|-------|------------|
| 7 cm  | 27 m  | 5507       |



## BIFLEXIDEAL®

### Kompresívny krátkoťažný obväz

#### Charakteristika:

- krátkoťažný obväz
- šírka 3 cm špeciálne na ruku a prsty
- jemný a príjemný na dotyk
- 65 % elasticita so silou 45 cN/cm
- farebnosť biela
- bez latexu

#### Indikácie:

- liečba lymfatického edému
- jednoduché a komplikované varixy
- liečba po skleroterapii
- liečba po operácii
- zredukovanie poúrazového edému
- varikózne vrede
- **upozornenie: obväz nepriklaď priamo na otvorenú ranu!**



| Šírka | Dĺžka | Farba | Ref. číslo |
|-------|-------|-------|------------|
| 3 cm  | 5 m   | Biely | 1100 02    |
| 6 cm  |       |       | 1100 02    |
| 8 cm  |       |       | 1100 02    |
| 10 cm |       |       | 1100 02    |



## FLEXIDEAL® SHORT STRETCH

### Krátkoťažný kompresívny obväz

**POPIS :** 75 % elasticita so silou 19 cN/cm. Pružný obväz, veľmi jemný a príjemný na dotyk, na kontinuálne použitie, bez latexu.

| Šírka | Dĺžka | Kód ZP | Ref. číslo |
|-------|-------|--------|------------|
| 8 cm  | 5 m   | A83665 | 1100 01    |
| 10 cm | 5 m   | A83666 | 1100 01    |









## BIPLAST

### Adhezívny kompresívny obväz

**Popis :** Diagonálna príľnavá aplikácia. Viacsmerná príľnavosť až po okraj obväzu. Pružný a nastaviteľný. Vynikajúca znášanosť.

| Šírka | Dĺžka | Farba                                                                             | Ref. číslo |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3 cm  | 2,5 m |  | 2000 01    |
| 6 cm  |       |                                                                                   | 2000 01    |
| 8 cm  |       |                                                                                   | 2000 01    |
| 10 cm |       |  | 2000 01    |
| 15 cm |       |                                                                                   | 2000 01    |
| 20 cm |       |  | 2000 01    |



## PENOVÝ OBVÄZ

### Emulgovaná latexová pena

**Popis :** Zošikmené okraje umožňujú prekryvanie obväzu pri ovíjaní bez toho, aby bol príliš hrubý. Prepúšťa vzduch, obmedzuje riziko macerácie rany.

| Hrúbka | Šírka | Dĺžka | Ref. číslo |
|--------|-------|-------|------------|
| 8 mm   | 8 cm  | 1 m   | 5308       |
| 8 mm   | 10 cm |       | 5310       |
| 12 mm  | 10 cm |       | 5410       |



## VARICO

### Podložka z latexovej peny


**Popis :** Optimalizácia kompresívnej liečby vyrovnávaním anatomického profilu. Prepúšťa vzduch, obmedzuje riziko macerácie rany.

| Model | Rozmery         | Balenie | Ref. číslo |
|-------|-----------------|---------|------------|
| 0     | 63 mm x 87 mm   | Pár     | 5200       |
| 1     | 70 mm x 132 mm  | Kus     |            |
| 2     | 125 mm x 164 mm | Kus     |            |
| 3     | 200 mm x 250 mm | Kus     |            |



## Rozlišujeme 2 typy obväzov

- Biflex 16 ľahký
- Biflex 17 silný

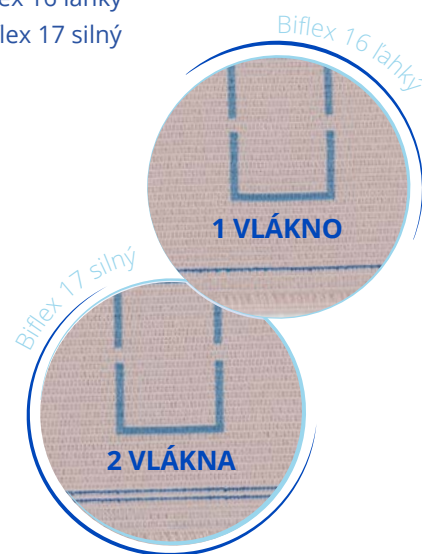


- modré vlákno pre lepšie rozlíšenie kompresie,  
Biflex 16+ = 1 vlákno  
Biflex 17+ = 2 vlákna

### NÁVOD NA PREKRYTIE:

#### Prekrytie v 2/3:

- kompresná trieda 2 (Biflex 16+)
- kompresná trieda 3 (Biflex 17+)

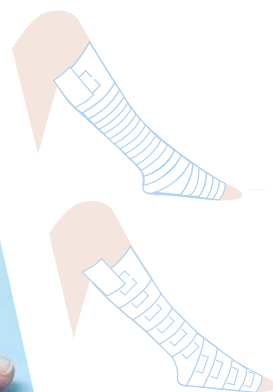

**Prekrytie v 1/2:**  
kompresná trieda  
1 (Biflex 16+) a  
2 (Biflex 17+)

## Princíp natiahnutia

**Patent spoločnosti Thuasne®:** Obdĺžnikový indikátor natiahnutia používa výhradne Thuasne. Umožňuje kontrolovať tlak vyvíjaný na postihnutú končatinu. **Natiahnutie s označením Thuasne na vonkajšej strane:** Napomáha použitiu s 1/2, 1/3 alebo 2/3 prekrytím vrstiev obväzu v závislosti od požadovaného tlaku. **Biflex+ sa dôkladne prispôsobí obrysom tela.**



# Kompresívne obvazy **BIFLEX®**

- viacroztlačný (do dĺžky aj do šírky) kompresívny obväz s indikátorom natiahnutia (graduácia)
- presná kontrola tlaku pomocou indikátora na obvaze (stupňovanie napnutia obvazu)
- účinný vďaka presnej miere kompresie
- znížené riziko nesprávneho používania
- doposiaľ neprekonané priemyselné know-how
- vyrobený na báze viskózy bez latexu

| Použitie                                                                               | BIFLEX® OBVÄZY              |                             |                             | ŠPECIFICKÉ OBVÄZY                            |                                      |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                        | Biflex 16+<br>1/2 prekrytie | Biflex 16+<br>2/3 prekrytie | Biflex 17+<br>1/2 prekrytie | Coton short<br>stretch                       | Biflexideal®<br>< 0,9 a > 1,3        | Mobiderm                                     |
|                                                                                        | Sila 1                      | Sila 2                      | Sila 3                      | Ochrana pokožky,<br>spodná vrstva<br>bandáže | Určené<br>pre mobilných<br>pacientov | Drenáž edému<br>pod viac vrstvou<br>bandážou |
| <b>PREVENČIA A RIZIKO RECIDÍVY FLEBOTROMBÓZY (HLBOKÁ ŽILOVÁ TROMBÓZA) 20 - 36 mmHg</b> | ●                           |                             |                             |                                              |                                      |                                              |
| <b>POVRCHOVÁ TROMBOFLEBITÍDA DK 20 - 36 mmHg</b>                                       | ●                           |                             |                             |                                              | ●                                    |                                              |
| <b>FLEBOTROMBÓZA (HLBOKÁ ŽILOVÁ TROMBÓZA) DK 20 à 36 mmHg</b>                          | ●                           |                             |                             |                                              | ●                                    |                                              |
| <b>FLEBOTROMBÓZA (HLBOKÁ ŽILOVÁ TROMBÓZA) HK 20 - 36 mmHg</b>                          | ●                           |                             |                             |                                              | ●                                    |                                              |
| <b>PO SKLEROTERAPII / PO CHIRURGICKOM ZÁKROKU VARIXOV (C2) 15 - 36 mmHg</b>            | ●                           |                             |                             |                                              |                                      |                                              |
| <b>VENÓZNE EDÉMY (C3) 20 - 36 mmHg</b>                                                 | ●                           |                             |                             | ●                                            | ●                                    | ●                                            |
| <b>HYPERPIGMENTÁCIE, EKZÉMY (C4A) 20 - 36 mmHg</b>                                     | ●                           |                             |                             | ●                                            | ●                                    |                                              |
| <b>LIPODERMATOSKLERÓZA A/ALEBO BIELA ATROFIA (C4B) 20 à 36 mmHg</b>                    | ●                           |                             |                             | ●                                            | ●                                    |                                              |
| <b>ZHOJENÝ VRED PREDKOLENIA (C5) 20 - 36 mmHg alebo &gt; 36 mmHg</b>                   |                             | ●                           |                             | ●                                            | ●                                    |                                              |
| <b>ČERSTVÝ VRED PREDKOLENIA (C6) &gt; 36 mmHg</b>                                      |                             |                             | ●                           | ●                                            | ●                                    |                                              |
| <b>POSTTROMBOTICKÝ SYNDRÓM</b>                                                         |                             |                             |                             |                                              |                                      |                                              |
| <b>LYMFEDÉM HK, POUŽITIE MAX. TOLEROVANÉHO TLAKU</b>                                   | ●                           |                             |                             | ●                                            | ●                                    | ●                                            |
| <b>LYMFEDÉM DK, POUŽITIE MAX. TOLEROVANÉHO TLAKU</b>                                   |                             | ●                           | ●                           | ●                                            | ●                                    | ●                                            |

\* HAS report / MEDICAL COMPRESSION DEVICE FOR INDIVIDUAL USE: USE IN VASCULAR DISEASES / September 2010  
**Odporúča sa nepoužívať obväz Biflex v prípade arteriálnych problémov. IPS nad 0,9 a pod 1,3.**



## VERZIE:

### Biflex 16+ (ľahký)

ref. číslo 1600 02  
**8 cm x 5 m** (Kód ZP A83667)  
**10 cm x 5 m** (Kód ZP A83668)

### Biflex 17+ (silný)

ref. číslo 1700 02  
**8 cm x 5 m**  
**10 cm x 5 m** (Kód ZP A83670)

**BIFLEX® 16+ ľahký**  
**BIFLEX® 17+ silný**

| Šírka | Dĺžka     |
|-------|-----------|
| 8 cm  | 3 m, 3,5m |
| 10 cm | 4 m, 5 m  |





## 2. UDRŽIAVACIA (STABILIZAČNÁ) FÁZA LYMFEDÉMU

Je to obdobie po prebehnutí základnej liečby metódami fyzioterapie, keď lymfedém má stabilizovaný tvar. Táto fáza nemá obmedzený čas trvania, je doživotná. V tomto období je potrebné pravidelné sledovanie pacienta formou dispenzárných kontrol ošetrojúcim lekárom, absolvovanie udržiavacej liečby metódami fyzioterapie podľa momentálneho stavu končatiny.

Je dôležitá pre ďalší vývoj ochorenia, vyžaduje vysokú disciplínu a spoluprácu zo strany pacienta.

### Fáza stabilizácie lymfedému:

- dispenzárna starostlivosť
- nosenie kompresívnych pomôcok
- autorehabilitácia
- dodržiavanie režimu edematózneho pacienta

**Základným predpokladom úspešnej liečby je aktívna spolupráca chorého. Pacient si musí byť vedomý, že úspech liečby je aj v jeho rukách a závisí od dodržiavania pokynov a odporúčaní lekára.**





**Veno Elegance®**  
ramenný návlek na plece  
s uchytením  
**Kód ZP G72332**  
*bez / s rukavičkou*


**Veno Elegance®**  
ramenný návlek pod pazuchu  
**Kód ZP G72332**  
*bez / s rukavičkou*



# VENO Elegance®

## štandardné liečebné kompresívne návleky a rukavičky

- jemné, mäkké, priedušné
- účinné, maximálne pohodlné pri nosení
- vysoká liečebná účinnosť pri čerstvých, mäkkých lymfedémoch
- pri edémoch po operáciách prsníka a následnej rádioterapii
- pooperačné a poúrazové edémy

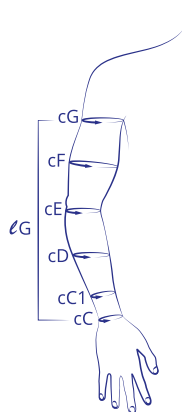


|               | SMALL     | MEDIUM    | LARGE       |
|---------------|-----------|-----------|-------------|
| cG            | 25 - 29,5 | 30 - 35,5 | 36 - 42     |
| cF            | 23 - 26,5 | 27 - 31   | 31,5 - 36   |
| cE            | 21 - 24,5 | 25 - 28,5 | 29 - 33     |
| cD            | 20 - 23,5 | 24 - 27,5 | 28 - 32     |
| cC1           | 13,5 - 16 | 16,5 - 19 | 19,5 - 22,5 |
| cC            | 13 - 15,5 | 16 - 18,5 | 19 - 22     |
| <b>Krátky</b> |           |           |             |
| lG            | 38 - 44   | 40 - 46   | 42 - 48     |
| <b>Dlhý</b>   |           |           |             |
| lG            | 42 - 48   | 44 - 50   | 46 - 52     |

## Kompresívna liečebná rukavička (Kód ZP G72333)

- vyrobená z pevnej nepáravej elastickej a priedušnej tkaniny
- dodávaná vo verzii s uzatvorenými prstami (je možná individuálna úprava - dĺžka prstov, celková dĺžka)
- k dispozícii v dvoch farebných variantoch (telová a čierna)

| Rukavička | Model                                                          |                                                                 | Veľkosť | Obvody       |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|--------------|
|           | <b>3448 01</b><br>uzatvorené<br>prsty, manžeta<br>dlhá (15 cm) | <b>3448 02</b><br>uzatvorené<br>prsty, manžeta<br>krátka (5 cm) | 1       | 13 - 14,0 cm |
|           |                                                                |                                                                 | 2       | 15 - 16,5 cm |
|           |                                                                |                                                                 | 3       | 17 - 18,5 cm |
|           |                                                                |                                                                 | 4       | 19 - 20,5 cm |
|           |                                                                |                                                                 | 5       | 21 - 22,5 cm |
|           |                                                                |                                                                 | 6       | 23 - 24,5 cm |
|           |                                                                |                                                                 | 7       | 25 - 26,5 cm |
|           |                                                                |                                                                 | 8       | 27 - 28,5 cm |

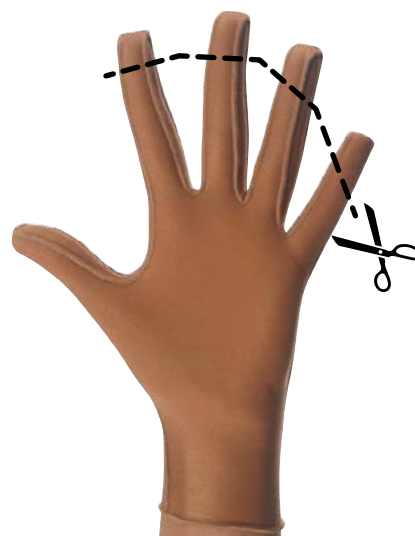

# MOBIDERM®

## ŠTANDARDNÉ MOBILIZAČNÉ NÁVLEKY



štandardné návleky MOBIDERM® sú určené na mobilizáciu edematózneho alebo stvrdnutého podkožného tkaniva.

### INDIKÁCIE:

- zmäkčenie fibrózy
- udržiavanie zredukovaného objemu lymfedému

### POUŽITIE:

- mobilizačné návleky sú vhodné v stabilizačnej fáze edému pri liečbe lymfedému
- je potrebné ich nosiť po fáze redukcie edému
- **návleky je potrebné nosiť počas noci a v prípade potreby aj cez deň** priamo na pokožke

### MATERIÁL:

- menšie kocky z polyetylénovej peny na povrchu ruky (5x5 mm)
- kocky na ramennom návleku z polyuretánovej peny (15x15 mm)
- nový mäkkší syntetický materiál: Airskin jersey
- zloženie materiálu: 59% polyamid, 41% elastán
- kompresia 10 mmHg
- farebnosť: béžová

### MODELÝ:

- samostatný ramenný návlak
- samostatná rukavička bez prstov, ktorá je obojstranná. Prispôsobenie na pravú alebo ľavú ruku sa dosiahne otočením naruby. Je potrebné dbať na správne umiestnenie štvorčekov na chrbte ruky
- samostatná rukavička s prstami (zvlášť pravá a ľavá)



**Ramenný návlek**  
ref. číslo 3730  
Kód ZP G94283




**Rukavička bez prstov**  
ref. číslo 3731  
Kód ZP G94284



**Rukavička s prstami**  
ref. číslo 3732  
Kód ZP G94285


Pre optimálnu liečbu sa odporúča používať súčasne ramenný návlek aj rukavičku

| Ramenný návlek |                       |                             |                                     |
|----------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Veľkosť        | Obvod zápästia C (cm) | Obvod v strede lakťa D (cm) | Obvod ramena na úrovni axily E (cm) |
| 1              | 14 - 16               | 22 - 25                     | 25 - 29                             |
| 1+             |                       | 24 - 27                     | 28 - 32                             |
| 2              | 16 - 18               | 25 - 28                     | 29 - 33                             |
| 2+             |                       | 27 - 30                     | 31 - 35                             |
| 3              | 18 - 20               | 28 - 31                     | 32 - 36                             |
| 3+             |                       | 30 - 33                     | 35 - 39                             |
| 4              | 20 - 22               | 31 - 34                     | 35 - 39                             |
| 4+             |                       | 33 - 36                     | 38 - 42                             |
| 5              | 22 - 24               | 34 - 37                     | 38 - 42                             |
| 5+             |                       | 36 - 39                     | 41 - 45                             |

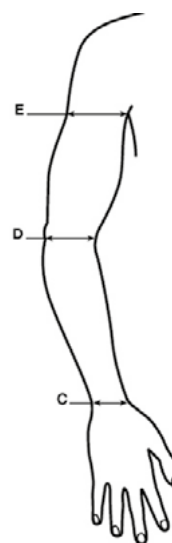


Výška tela: DLHÁ > 165 cm | NORMÁLNA < 165 cm


| Rukavica |                       |                                |
|----------|-----------------------|--------------------------------|
| Veľkosť  | Obvod zápästia C (cm) | Obvod za hánkami prstov B (cm) |
| 1        | 14 - 16               | 15 - 17                        |
| 2        | 16 - 18               | 17 - 19                        |
| 3        | 17 - 19               | 19 - 21                        |
| 4        | 19 - 21               | 21 - 23                        |
| 5        | 20 - 22               | 23 - 25                        |
| 6        | 21 - 23               | 25 - 27                        |

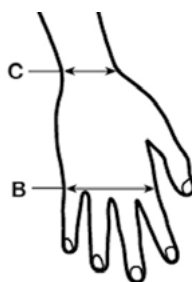

**Mobiderm podkolenky alebo pančuchy vyrobené pre pacientov na mieru**  
(kocky 15 mm x 15 mm)

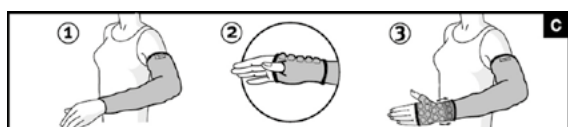

Správne nasadenie ramenného návleku

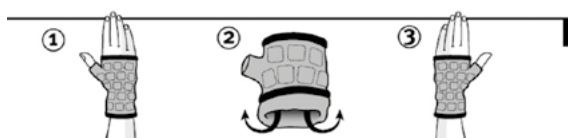

Správne nasadenie rukavičky (pravá/ľava ruka)



# MOBIDERM® Autofit

štandardné mobilizačné návleky s nastavením kompresie

Mobilizačné návleky MOBIDERM® Autofit sú patentované zdravotnícke pomôcky určené na mobilizáciu edematózneho alebo stvrdnutého podkožného tkaniva.

## Liečebný princíp:

MOBIDERM® Autofit návlak pôsobí rozdielnym tlakom na kontaktné oblasti a ich okolie, čo vedie k drenážnemu efektu v podkožnom tkanive. Pri pohybe pacienta dochádza k striedaniu rozloženia tlaku v dôsledku zmeny objemu a tvaru patričných svalových skupín. Tým prebieha lokálna lymfodrenáž a zmenšenie edému.

## Indikácie:

- lymfatické ochorenia, liečba lymfedému alebo zmiernenie indikácií
- zmäkčenie fibrózy
- udržiavanie zredukovaného objemu lymfedému

## Funkcia:

- unikátna patentovaná zdravotnícka pomôcka určená na liečbu lymfedému v stabilizačnej (udržiavacej) fáze edému
- neustála a efektívna dobre naložená bandáž s kontrolovaným správnym kompresívnym tlakom vo dne aj počas noci
- je potrebné nosiť ich po fáze redukcie edému
- plní úlohu niekoľkých pomôcok, pretože ju **možno nosiť počas dňa aj počas noci** a to priamo na pokožke
- umožňuje nastavenie potrebného tlaku na končatinu v závislosti od anatomických pomerov
- jednoduchšia manipulácia ako pri náročnom nakladaní niekoľko vrstvovej bandáže
- pacienta neobmedzuje
- redukcia opuchu je neustála

Mobilizačný návlak na liečbu lymfedému s individuálnym nastavením kompresie:

**Mobiderm® Autofit**  
ref. číslo 3733  
ramenný návlak  
s rukavičkou a palcom


**Kód ZP G96299**  
***zvlášť pravý a ľavý***



**Mobiderm® Autofit**  
stehenný návlek  
ref. číslo 3735  
Kód ZP G98237




**Mobiderm® Autofit**  
lýtkový návlek  
ref. číslo 3734

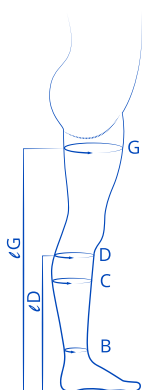

|           | Obvod členka (B) (cm) | Obvod lýtky (C) (cm) | Obvod pod kolonom (D) (cm) | Obvod stehna (G) (cm) |
|-----------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>T1</b> | 16 - 24               | 24 - 35              | 25 - 36                    | 46 - 57               |
| <b>T2</b> | 20 - 28               | 32 - 43              | 32 - 43                    | 53 - 65               |
| <b>T3</b> | 24 - 32               | 40 - 51              | 39 - 50                    | 61 - 72               |
| <b>T4</b> | 28 - 36               | 48 - 59              | 46 - 57                    | 68 - 80               |

|                   | krátka     | normálna   | dlhá       | extra dlhá |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Dĺžka I(D)</b> | 38 - 40 cm | 40 - 42 cm | 42 - 44 cm | 44 - 46 cm |
| <b>Dĺžka I(G)</b> | 67 - 72 cm | 72 - 77 cm | 77 - 82 cm | 82 - 87 cm |

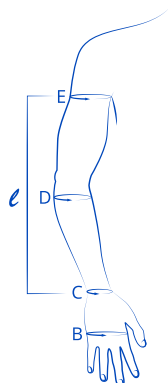

|           | Obvod ruky v podpazuší (E) (cm) | Obvod ruky cez lakť (D) (cm) | Obvod zápästia (C) (cm) | Obvod dlane cez hánky (B) (cm) |
|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>T1</b> | 25 - 32                         | 22 - 28                      | 15 - 19                 | 17 - 21                        |
| <b>T2</b> | 29 - 36                         | 24 - 30                      | 16 - 20                 | 17 - 21                        |
| <b>T3</b> | 33 - 40                         | 26 - 32                      | 17 - 21                 | 18 - 22                        |
| <b>T4</b> | 37 - 44                         | 28 - 34                      | 17 - 21                 | 18 - 22                        |
| <b>T5</b> | 41 - 48                         | 30 - 36                      | 18 - 22                 | 19 - 23                        |
| <b>T6</b> | 45 - 52                         | 31 - 37                      | 19 - 23                 | 20 - 24                        |

**Dĺžka ramenného návleku (l)** (meria sa dĺžka ruky od zápästia po podpazušie)

|               |            |
|---------------|------------|
| <b>normál</b> | 40 - 45 cm |
| <b>dlhý</b>   | 45 - 50 cm |



# Individuálne vyrábané ramenné návleky a kompresívne pančuchy

## Kódy ZP individuálne vyrábaných pomôcok VENOFLEX Elegance, VENOFLEX Micro a LYMPHATREX

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Podkolenky na mieru .....            | Kód ZP G00147 |
| Polostehenné pančuchy na mieru ..... | Kód ZP G00148 |
| Stehenné pančuchy na mieru .....     | Kód ZP G00149 |
| Pančuchové nohavice .....            | Kód ZP G00150 |
| (dámske, pánske, tehotenské)         |               |

## VENOFLEX Elegance® a VENOFLEX Micro

Cirkulárne tkané individuálne vyrábané pomôcky

### Horná končatina (VENOFLEX Elegance®):

**Ramenné návleky:** - 2. KT 23-32 mmHg    Kód ZP G00152  
                              - 3. KT 34-46 mmHg

- samostatný ramenný návlek
- samostatný ramenný návlek s integrovanou rukavičkou
- lem jednoduchý, s nekĺzavým ukončením, uchytením na podprsenku

### Dolná kočatina (VENOFLEX Elegance® a VENOFLEX Micro):

**2. KT 23-32 mmHg**  
**3. KT 34-46 mmHg**





- pančuchy s otvoreným alebo uzavretým špicom
- nekĺzavé ukončenie pre ženy alebo pre mužov, alebo uchytenie v páse
- kompresívne pančuchové nohavice aj s možnou kompresiou v abdominálnej oblasti





# LYMPHATREX®

Plocho tkané individuálne vyrábané  
ramenné návleky a kompresívne pančuchy

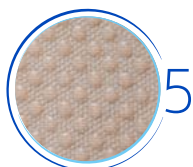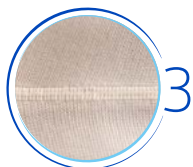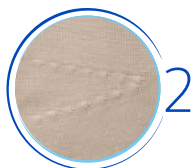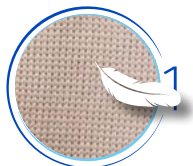


1. kompresívne odevy Lymphatrex sú vyrábané z polyamidových mikrovlákiem jemných na dotyk (75% polyamid / 25% elastán)
2. zóny pohodlia - anatomické prispôsobenie materiálu najmä v citlivých oblastiach (pod kolenom, pri lakti)
3. úplet zabezpečuje termoreguláciu - absorpciu aj odparovanie vlhkosti do prostredia. Ploché švíky, aby neprekážali.



4. 1 čierna a 2 béžové farby na prispôsobenie sa typu pleti a každodennej potreby.
5. silikónové neklzáve ukončenie pre väčšie pohodlie.

## Dostupné modely

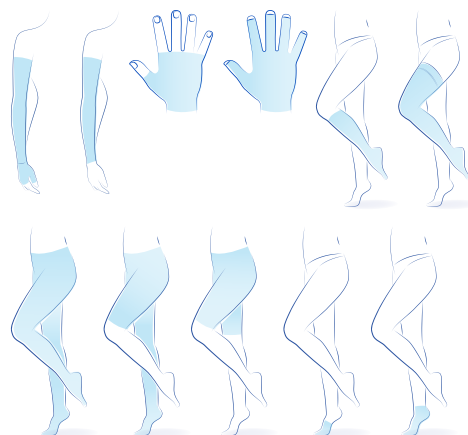

## Bezšvová rukavička LYMPHATREX® / CICA TREX®

- rukavička je indikovaná v udržiavacej fáze liečby lymfedému pri opuchoch prstov
- taktiež pri liečbe jaziev po popáleninách a pri poškodení venózneho systému





# CICATREX®

## Kompresívne odevy CICATREX® na liečbu jaziev po popáleninách

Každý piaty človek na Slovensku si počas svojho života privodí popáleninu. Ročne asi 600 z nich sa pri nehode tak ťažko zraní, že musia byť liečení na špeciálnych klinikách popálenín a rekonštrukčnej chirurgie.

### Rozoznávame tri rôzne stupne popálenín:


- popálenina 1. stupňa (1°)
- povrchová popálenina 2. stupňa (2a°)
- hlboká popálenina 2. stupňa (2b°)
- popálenina 3. stupňa (3°)

### Kompresívne odevy Cicatrex®:


- vyvinuté špeciálne na prevenciu a liečbu hypertrofických jaziev po popáleninách.
- na povrch tela pôsobia rovnomerným tlakom asi 25 mmHg, pričom zohľadňujú morfológiu ľudského tela.
- vyrábané sú pre pacienta individuálne počítačom riadenou technológiou, aby sa docielil presný kompresívny tlak a tvar odevu.
- zaručujú dostatočný tlak, minimalizujú tak tvorbu jaziev a prispievajú k úspešnému hojeniu.
- trvalá kompresia spôsobuje spomalenie prietoku krvi (zníženie prívodu kyslíka), redukcii tvorby fibroplastov a syntézy kolagénu, čím znižuje sčervenanie jazvy, zmierňuje svrbenie a koža sa stáva mäkkou a pružnejšou.
- odev nevyvoláva žiadne alergie, je odolný voči mastiam, príjemný na pokožku, priedušný.




hypertrofická jazva  
pred liečbou

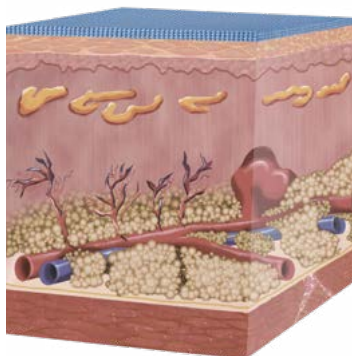

účinko kompresie počas  
používania odevu Cicatrex

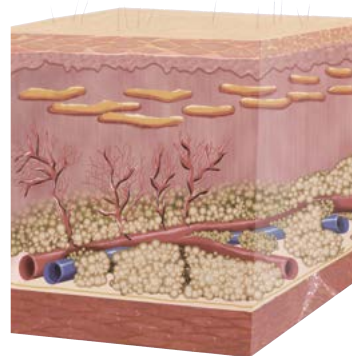

vyhladená jazva po liečbe  
Cicatrex odevmi



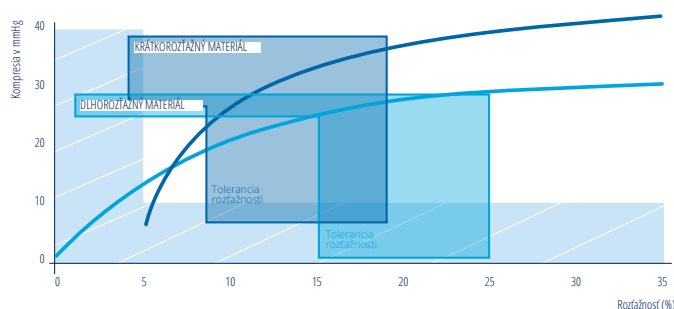


GRAF ÚČINKU Cicatrex®




### Dôležité fakty potrebné vedieť:

Proces dozrievania a stabilizácie jazvy trvá približne 18 mesiacov. Cicatrex® odevy optimálne zabezpečujú správny účinok kompresie počas tohto procesu. Aby bol účinok liečby čo najefektívnejší, je potrebné nosiť kompresívny odev ihneď po zhojení jazvy.





## MATERIÁL Cicatrex®

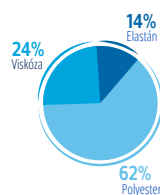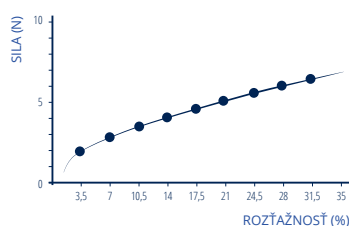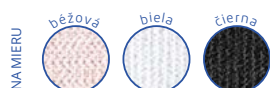

- vlákna sú veľmi jemné
- predurčené na použitie na prsty
- výborne prepúšťa vzduch a vlhko

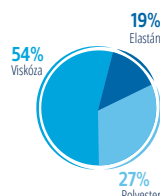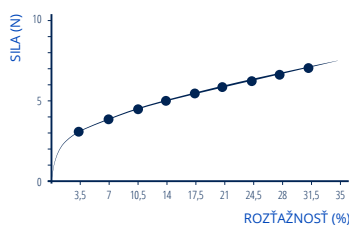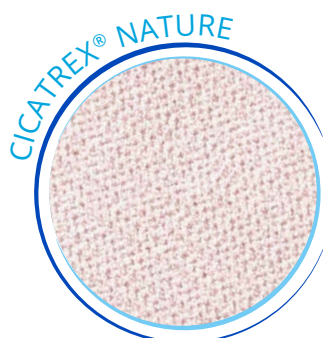

- vlákna majú vysoký obsah viskózy – 54%
- pokožka materiál výborne toleruje
- veľmi príjemný a priadušný materiál, vhodný pre detských pacientov

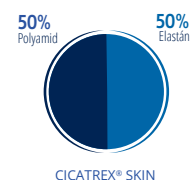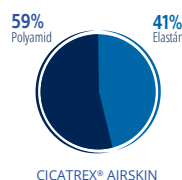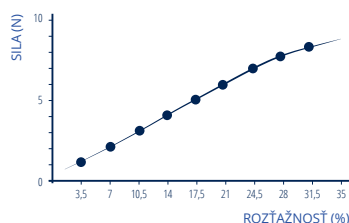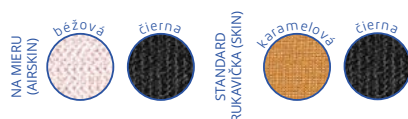

- estetický materiál
- rýchlo schne
- jednoduché obliekanie







Každoročne Vám prinášame jesennú exkluzívnu limitovanú edíciu kompresívnych podkolenok. Tento rok sme sa zamerali na mužov, ktorí tiež vyhľadávajú pohodlné bavlnené materiály.

# VENOFLEX

## City Comfort Damier®

ref. číslo: 5329 04

### *Trendy*

Veľmi moderný exkluzívny vzor pre mužov s ležérnym alebo elegantným štýlom. 2 farby: šachovnicový vzor s čiernym lemom, ľahká kombinácia s odevmi

### *Pohodlné na nosenie*

Príjemný priedušný materiál s obsahom bavlny je príjemný ku pokožke. Horný okraj zabraňuje turniketovému efektu.

### *Odolné voči opotrebovaniu*

Zosilnená špička a päta zabezpečujú dlhý čas používania



# Naše ďalšie promo materiály



KATALÓG ORTOPÉDIA



KATALÓG PREVENTÍVNE  
PANČUCHY



KATALÓG SILIMA



Leták Agricalm  
Opakovane použiteľný  
obklad plnený prírodným  
ílom



Leták Thuasne Sport  
- sortiment športovej UP  
kompresie



Leták KIT BIFLEX - súprava  
krátkorožťážných kompresívnych  
obvázov



Leták Homecare



Leták Venoflex  
Soft & Care - preventívne  
a liečebné kompresívne  
podkloienky



Leták Ortopedické  
pomôcky





**THUASNE**

*WINGS  
FOR YOUR HEALTH*

**THUASNE SK, s.r.o.**

**Sídlo:** Karadžičova 2, 811 09 Bratislava

**Distribúcia:** Mokráň záhon 4 - 821 04 Bratislava

**Tel.** +421 2 4910 4088, 89 - **Fax:** +421 2 4445 0080

**e-mail:** [objednavky@thuasne.sk](mailto:objednavky@thuasne.sk)

**[www.thuasne.sk](http://www.thuasne.sk)**

---

Vyhradzujeme si právo upraviť naše výrobky uvádzané  
a popísané v tomto katalógu bez predchádzajúceho upozornenia.  
Nezmluvné fotografie.

Overte si prosím dostupnosť  
produktov pred objednávkou.